

Verwendungszweck

Die Gehhilfe ist für Personen mit eingeschränkter Gehfähigkeit konzipiert und dient zur Erhöhung der Gangsicherheit. Die Anwendung dieser Gehhilfe kann im Innenraum und außerhalb des Hauses erfolgen. Sicherheitshinweise unbedingt beachten!

Die Gehhilfe sorgt durch weiches, gefedertes Aufsetzen für ein schmerzfreies Gehen und dient damit zur Entlastung der Gelenke und Muskeln (innenliegende Dämpfungsfeder). Die Dämpfungseinstellung kann nach Größe und Gewicht des Patienten angepasst werden, ohne Zuhilfenahme eines Werkzeuges. Die Höhe der Gehhilfe ist 7-fach und die Armschale ist 3-fach verstellbar.

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler oder Pflegepersonal in die Benutzung der Gehhilfe einweisen und die funktionsgerechte Einstellung vornehmen.

Vor der Inbetriebnahme

Höhenverstellung (7-fach verstellbar)

- Gehhilfe am Griff mit starken Druck nach unten drücken
- Position halten und den untersten Clip herausziehen
- Druck nachlassen und die Gehhilfe leicht nach oben ziehen-Saugkapsel mit den Füßen leicht festhalten
- obersten Clip herausziehen
- gewünschte Höhe einstellen (auf Handgelenkshöhe).
- obersten Clip wieder einstecken
- Schlitz vom inneren Rohr mit äußerem Rohr in eine Position bringen und die Gehhilfe am Griff leicht nach unten drücken
- untersten Clip bei richtiger Positionierung einstecken
- Prüfen ob die Einstellungen für Sie passen

Dämpfungseinstellung

- Gehhilfe am Griff mit starken Druck nach unten drücken
- Position halten und den untersten Clip herausziehen
- Gehhilfe weiter fest nach unten Drücken und Schlitz vom inneren Rohr auf gewünschte Position vom äußeren Rohr bringen
- Clip an der gewählten Position wieder einstecken
- Prüfen Sie ob die Dämpfung für Sie richtig ist.
- Bei erneuter Verstellung –Vorgang wiederholen

Anpassen der Armschale (3-fach verstellbar)

- Federbolzen / Armschale in die Bohrung eindrücken
- Armschale in die gewünschte Position verschieben
- Federbolzen wieder in die Bohrung einrasten lassen

Sicherheitshinweise

- **Beachten Sie das auf dem Produkt angegebene maximale zulässige Körpergewicht!**
- **Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Gehhilfe auf Beschädigungen. Sollten Schäden erkennbar sein, nehmen Sie die Gehhilfe nicht in Gebrauch.**
- Vor Benutzung folgende Punkte unbedingt prüfen:
 - ✓ Kunststoffclip muss ganz eingedrückt sein
 - ✓ Saugkapsel darf nicht abgenutzt/beschädigt sein
- Lassen Sie sich beim Überwinden von Hindernissen zu Ihrer eigenen Sicherheit von einer Begleitperson unterstützen, damit diese Sie bei einem Fallen auffangen kann.
- Führen Sie beim Begehen von Treppen eine Hand am Geländer, die andere Hand stützen Sie auf die Gehhilfe ab.
- Sollten Sie doch einmal stürzen: Lassen Sie die Gehhilfe möglichst seitlich fallen, damit Sie nicht auf die Gehhilfe fallen!



Achtung!
Sturzgefahr durch Wegrutschen

- Überprüfen Sie regelmäßig die Saugkapsel auf Beschädigungen und Abnutzung.
- Die Gehhilfe muss beim Gehen so senkrecht wie möglich aufgesetzt werden. Setzen Sie daher die Gehhilfe nie zu weit vom Körper entfernt auf.
- Benutzen Sie die Gehhilfe nur zur Unterstützung der Gehfähigkeit.
- Die Gehhilfe darf keinesfalls zweckentfremdet werden. (Aufstehhilfe, zum Hebeln, Versetzen von Möbeln,)
- Es dürfen keine mechanischen Veränderungen vorgenommen werden (Haftung!).
- An der Gehhilfe keine Gegenstände (Tasche, Beutel, usw.) aufhängen.
- Die Gehhilfe nicht über längeren Zeitraum der Sonnenstrahlung aussetzen. (am Fenster, an der Heizung, hinter einer PKW-Scheibe)
- Nach längerer Nichtbenutzung: Gehhilfe durch Fachpersonal überprüfen lassen.
- Gehen Sie niemals mit der Gehhilfe ohne Gleitschützer (Eiskralle) auf schnee- oder eisbedeckten Untergrund.
- Vorsicht bei feuchten Fliesen, Böden oder überqueren von losen Teppichböden.

Pflege und Wartung

Alle Kunststoffteile können mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gereinigt werden. Beachten Sie deren Produktinformation.

Bei den Rohrelementen ist in den meisten Fällen ein feuchtes Abwischen und anschließendes Trockenreiben völlig ausreichend. **Eine mangelhafte oder vernachlässigte Pflege und Wartung führt zur Einschränkung der Produkthaftung.**

Austausch der Saugkapsel

Abgenutzte oder beschädigte Saugkapsel abziehen und die neue Kapsel aufschieben. Achten Sie auf die zugehörige Kapselgröße und auf deren festen Sitz.

Hinweis!

Achten Sie darauf, dass sich in der Saugkapsel ein Metallplättchen befindet. Es schützt davor, dass die Kapsel vom Rohr der Gehhilfe durchstoßen werden kann. Die Folge könnte sonst sein, dass es zu einer Beschädigung des Fußbodens kommt.

Risiko einer erhöhten Sturzgefahr durch Wegrutschen.



Entsorgung

Eine defekte oder alte Gehhilfe gehört nicht in den normalen Hausmüll. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Müllentsorgungsunternehmen, wo und wie Sie die Gehhilfe entsorgen können.

Gewährleistung

Auf unsere Gehhilfe geben wir eine Garantie von **24 Monaten**; hiervon sind alle Verschleißteile ausgeschlossen.

Wiedereinsatz (Verleih)

Die Gehhilfe ist nach der Richtlinie 93/42/EWG (Anhang 1) als **Einmalartikel** eingestuft. Hier verweisen wir auf die Bedingungen des Medizinproduktegesetzes (MPG §8) und des Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG §4).

Hinweis !

Die Betriebsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren. Bei Beanstandungen/Rückfragen geben Sie bitte die Art.Nr., Typ und die BA-Nr. an

Was wir sonst noch liefern ...

- Gehhilfen
- Achselstützen
- Duschhocker
- Dusch- und Toilettenstühle
- Rollatoren
- Patientenlifter
- Aufsteh- und Aufrichthilfen

Rufen Sie uns an.... wir informieren Sie gerne!

Ihr **REBOTEC**-Team

Technische Daten

Art.Nr.	Bezeichnung	Höhe cm	Kapsel- größe	Max. Körperlast
125.50	NW-ergonomisch	82-96	19mm	120kg
124.50	NW-anatomisch	82-96	19mm	120kg

Ersatz- und Zubehörteile

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung
160.10	Griffpolster, Standard	
162.10	Griffpolster, anatomisch	
161.10	Armschalenpolster	
166.00	Eiskralle	
168.10.17	Antirutschpuffer	Big-Foot
200...00	Saugkapsel 19mm	mit Metalleinlage

Technische Änderungen vorbehalten!



REBOTEC Rehabilitationsmittel GmbH
D-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
Telefon: 05431/9416-0
Telefax : 05431/9416-66
<http://www.rebotec.de>
e-mail: info@rebotec.de



Betriebsanleitung

BA-Nr.: 01.03.054/11-06(KP)

Gehhilfe **NEW WALK**

Art.Nr.: 125.50 ergonomisch

Art.Nr.: 124.50 anatomisch

Ihr Fachhändler:



innenliegende
Dämpfungsfeder

