

Wewa® Med Peronaeusorthese

Materialien

- Siehe Wäscheetikett

Pflege- und Waschinweise

- Siehe Wäscheetikett

**Artikel nur für den bestimmungsgemäßen
Gebrauch bei einer Person verwenden!**

Wewa® Med Peronaeusorthese

**HMV POS.-NR.
23.03.02.0XXX**

Universalgröße
Art./REF 60067



Werkmeister GmbH + Co. KG • Eschweiger Straße 10 • 37281 Wanfried • Germany
www.werkmeister-gmbh.de • QM-Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 • 0216-70733



Werkmeister®

Werkmeister®

Wewa® Med Peroneusorthese

Die Wewa® Med Peroneusorthese unterstützt die Fußhebung und das Abrollverhalten bei leichten Peroneuslähmungen und erhöht so die Gangsicherheit.

Die anwenderfreundliche Konstruktion erleichtert die alltägliche Anwendung. Die Orthese ist zur Verwendung in Schnürschuhen geeignet.

Indikation

- Peroneus-Parese, besonders für leichte bis mittlere Fuß- und Zehenheberparesen (Kraftgrad 2-4)

Nicht anwenden bei spastischer Lähmung.

Anwendungshinweise

Die Erstanpassung sollte ausschließlich durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Nur dadurch wird die volle Leistungsfähigkeit der Orthese und ein optimaler Tragekomfort gewährleistet.

- Das Steckschloss öffnen und die Fußplatte lösen

- Die obere Wadenschelle direkt unter dem Knie (Schritt 1) und die untere Wadenschelle direkt über dem Sprunggelenk fest anlegen (Schritt 2)
- Darauf achten, dass die Wadenschellen nicht in das Bein einschneiden
- Beim Anziehen des Schuhs die Fußplatte auf der Lasche mit in den Schuh einschieben (Schritt 3) und durch die Schuhschnürung fixieren
- Das Steckschloss schließen. (Schritt 4) Die Vorspannung ist korrekt eingestellt, wenn das elastische Band bei 0°-Stellung des Fußes gespannt ist ohne die Fußspitze anzuheben

